


Kurzanleitung zur Wundversorgung mittels Granulox® Spray

1. Wunde reinigen und mit physiologischer Lösung spülen



- Super-oxidiertes Wasser
- Kochsalz- oder Ringerlösung
- Polyhexanid

2. Granulox® Spray gleichmäßig aus 5 - 10 cm aufsprühen

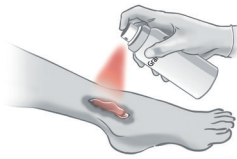

Um Antrocknen zu verhindern

- Sprühkopf nach Anwendung mit alkoholgetränktem Tuch reinigen
- Produkt im Kühlschrank lagern

Sprühkopf verklebt?

- Abziehen und ersetzen oder einen neuen Spray bestellen

3. Abdecken mit atmungsaktiver Wundauflage



- Superabsorber/Hydrofasern
- Distanzgitter
- Hydropolymerverbände/Schaumverbände

Hinweise zur Lagerung

Längere Standzeiten: Kühlschrank 2 ° C – 8 ° C
An Anwendungstagen: Raumtemperatur max. 25 ° C

Wechselwirkungen

Nicht anwenden mit lokal wirkenden Therapeutika, wie z.B. Antibiotika. Beeinträchtigung durch: Desinfektionsmittel und proteolytische (enzymatische) Debridements

Kontraindikationen

Zur Sicherheit sollte der Granulox® Spray nicht bei infizierten Wunden oder während einer Schwangerschaft angewendet werden

