



# Mechanisches Débridement mit LIGASANO® Wundputzer®

## Patientendaten und Anamnese:

Die LIGASANO® Wundputzer® medium wurde bei einer Patientin mit einem Ulcus Cruris arteriosum angewendet. Wie auf Abbildung 1 erkennbar, war die Wunde stark mit Fibrinbelägen bedeckt.

Bisher wurde die Wunde herkömmlich mit getränkten, sterilen Kompressen (Actimaris sensitive Wundspüllösung) gereinigt. Hierdurch konnten die Fibrinbeläge nur unzureichend vom Wundgrund gelöst werden. Die Patientin empfand diese Art der Reinigung als unangenehm und zeitweise schmerzhaft.

Es erfolgte daher die Umstellung des Procedere auf die Reinigung mit dem LIGASANO® Wundputzer®. Mit Hilfe des LIGASANO® Wundputzers® medium konnten die lockeren Beläge schmerzfrei entfernt werden. Durch die feinporige Beschaffenheit des Wundputzers ließen sich Wundbeläge deutlich schonender als im Vergleich zu herkömmlichen sterilen Kompressen entfernen. Auch für den Anwender ergibt sich auf Grund der Formstabilität und einer zweckmäßigen Größe des ein deutlich komfortableres und sichereres Handling für ein schonendes, mechanisches Débridement.



**Abb. 1:** Zustand vor mechanischem Débridement mit dem LIGASANO® Wundputzer® medium



**Abb. 2:** Zustand nach mechanischem Débridement mit dem LIGASANO® Wundputzer® medium



**Abb. 3:** LIGASANO® Wundputzer® medium nach dem Einsatz

## Fazit:

Durch den Einsatz des LIGASANO® Wundputzers® medium konnte ein patientenschonendes mechanisches Débridement vorgenommen werden. Nach der Anwendung war ein sauberer Wundgrund und eine saubere Wundumgebung gegeben, die den positiven Verlauf der Wundheilung stark begünstigte. Der LIGASANO® Wundputzer® medium ist eine sehr gute Alternative zu den LIGASANO® Wundputzern® intensiv und soft.