


Wunder Punkt Infektionsmanagement? Zeit für den Wendepunkt!

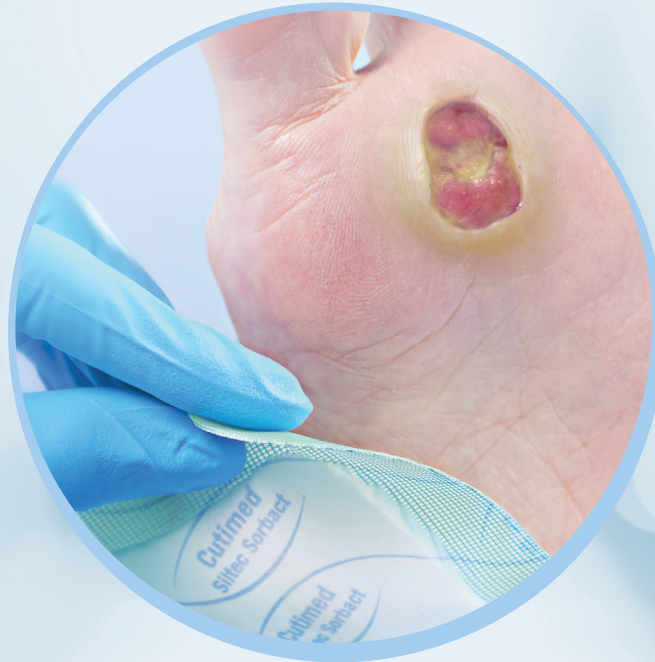

 **Cutimed**[®]

”

*Ich nutze Cutimed® Siltec® Sorbact®, da es einfach und sicher bei infizierten Wunden einsetzbar ist und ich zufriedene Patient*innen habe.¹*

“



**Meine Alternative
zu Silber und PHMB**

Cutimed® Siltec® Sorbact®

Lernen Sie den hochabsorbierenden Schaumverband mit Silikon-Haftrand kennen. Cutimed® Siltec® Sorbact® vereint wirkstofffreie bakterienbindende Wirkung mit effektivem Exsudatmanagement in einem Produkt.

¹ Belegt in folgender Studie:
Seckam et al. Clinical performance and quality of life impact of an absorbent bacteria-binding foam dressing. *Br J Nurs.* 2021;30(5):S21-S30.

Cutimed® Siltec® Sorbact®

Sicheres und unkompliziertes Infektions- und Exsudathandling in der Wundversorgung

Einfach.
Sicher.
Wirksam.



Cutimed® Siltec® Sorbact® eignet sich für alle sauberen, kolonisierten, kontaminierten oder infizierten Wunden und wird bei mäßig bis stark exsudierenden oder zur Prophylaxe infektgefährdeter Wunden eingesetzt.



Diabetisches Fußsyndrom



Chronische Wunden



Traumatische Wunden

Beispielhafte Indikationen:

- Diabetisches Fußsyndrom
- Chronische Wunden
- Traumatische Wunden
- Postoperative Wunden
- Wunden nach Exzision von Fisteln und Abszessen

Verbandwechsel:

Abhängig von der Patientin oder dem Patienten und der Wundsituation – spätestens jedoch nach 7 Tagen.

Cutimed® Siltec® Sorbact® – sicher einsetzbar bei infizierten Wunden


Das leistet Cutimed® Siltec® Sorbact®	Meine Anwendervorteile
Sichere Bindung von Bakterien ohne Rückstände	Keine Heilungsverzögerung
Keine Abgabe von chemischen Substanzen	Unbedenkliches Infektionsmanagement selbst bei Risikopatient*innen
Bindet, hemmt und entfernt Bakterien und Pilze	Zeitlich uneingeschränkte Anwendungsdauer
Hautfreundliche Haftung durch Silikon-Haftrand	Sanfte und sichere Fixierung ohne Hautschädigung sowie einfache Applikation
Superabsorber-Technologie mit vertikaler Absorption	Hohe Aufnahmefähigkeit und passendes Exsudathandling
DACC-Beschichtung	Ist sicher erstattungsfähig

Das Sorbact®-Wirkprinzip – physikalisch und einzigartig


Cutimed® Sorbact® nutzt die sichere und effektive Sorbact®-Technologie. Durch die rein physikalische Wirkweise werden Bakterien und Pilze entfernt, ohne zusätzliche Endotoxine freizusetzen.^{2, 3, 4}



1. Eine **infizierte, kolonisierte** Wunde.

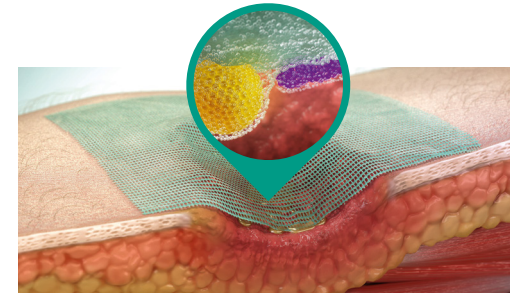

2. **Cutimed® Sorbact®** wird direkt auf die Wunde appliziert. Bakterien und / oder Pilze binden sich an das **Sorbact®-Gewebe**.

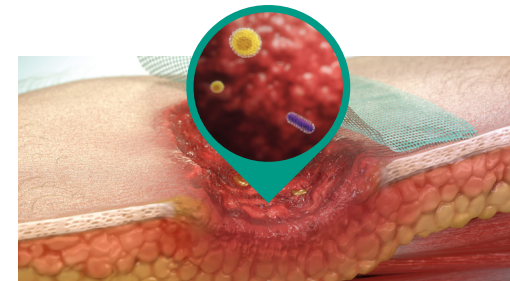

3. **Mit jedem Verbandwechsel** werden die gebundenen Krankheitserreger aus der Wunde entfernt.

² Husmark J et al. Antimicrobial effects of bacterial binding to a dialkylcarbamoyl chloride-coated wound dressing: an in vitro study. *J Wound Care*. 2022;31:560–570.

³ Ljungh A et al. Using the principle of hydrophobic interaction to bind and remove wound bacteria. *J Wound Care*. 2006;15(4):175–180.

⁴ Susilo YB et al. Significant and rapid reduction of free endotoxin using a dialkylcarbamoyl chloride-coated wound dressing. *J Wound Care*. 2022;31(6):502–509.

Cutimed® Siltec® Sorbact® – Ihr Schaumverband für sicheres Infektionsmanagement

Hohe Absorptionskapazität

dank der Superabsorber-Technologie

Schützt die Wundränder

aufgrund der vertikalen Absorption durch den offenporigen Polyurethanschaum



Sanfte und sichere Fixierung

Atraumatischer und schmerzreduzierter Verbandwechsel

Bindet und verankert Bakterien irreversibel




dank der effektiven Sorbact®-Wundkontaktschicht



Hier wird das Wirkprinzip in einem kurzen Video erklärt!

Entscheiden Sie sich jetzt für Cutimed® Siltec® Sorbact®

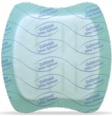PZN für
das Rezept

Kombinationsprodukte	Wundpadgröße	Größe	Inhalt	BE/VE	Best.-Nr.	PZN*
 <p>Cutimed® Siltec® Sorbact® Hochabsorbierender, keimreduzierender Schaumverband mit Silikon-Haftrand</p> 	4 x 4 cm	7,5 x 7,5 cm	12 Stück	1/10	7325107	07342672
	6 x 6 cm	10 x 10 cm	12 Stück	1/10	7325117	13574412
	8,2 x 8,2 cm	12,5 x 12,5 cm	12 Stück	1/10	7325108	07342689
	10 x 10 cm	15 x 15 cm	12 Stück	1/10	7325109	07343140
	5 x 16,5 cm	10 x 22,5 cm	12 Stück	1/10	7325115	13574398
	12,3 x 12,3 cm	17,5 x 17,5 cm	6 Stück	1/10	7325110	07343157
 <p>Cutimed® Siltec® Sorbact® (Oval) Cutimed® Siltec® Sorbact® (Sacrum)</p>	16,5 x 16,5 cm	22,5 x 22,5 cm	6 Stück	1/10	7325111	07343223
	6 x 3 cm	7 x 10 cm	12 Stück	1/10	7325119	13574429
	12,5 x 10,6 cm	17,5 x 17,5 cm	6 Stück	1/10	7325112	07343246
	16,6 x 14 cm	23 x 23 cm	6 Stück	1/10	7325113	07343269

Sicherheit in der Wundversorgung – mit Cutimed® als starkem Partner

Wir sind bei fachlichen Fragen an Ihrer Seite – mit persönlicher
Telefonberatung und online als Team Cutimed®!

